



Mantenimiento y desinfección de lentes de contacto rígidos permeables al gas



Los inseparables
MENICARE PURE & PROGENT

USO
DIARIO

MENICARE PURE

La nueva solución multiusos
para lentes rígidos permeables al gas*,
para **una mayor comodidad en la vida diaria.**



Indicaciones

- Limpieza
- Desinfección: Eficacia sobre bacterias y hongos en 30 minutos y activo en amebas (trofozoitos) en 4 horas
- Conservación
- Enjuague

Composición

- Poli-lisina 0.01%.
- Edetato Disódico 0.05%
- HCO 60 0.1%

Modo de empleo MENICARE PURE

- Lávese bien las manos antes de manipular los lentes.
- Frote suavemente el lente con unas gotas de MENICARE PURE durante 20 segundos.
- Coloque cada lente en el soporte correspondiente del estuche, "R": derecho, "L": izquierdo, y enjuáguelos con MENICARE PURE.
- Llene el estuche con MENICARE PURE y remoje los lentes durante al menos 30 minutos o toda la noche.
- Antes de la colocación, enjuague los lentes con MENICARE PURE.
- Mantenga el estuche limpio y seco después de cada uso.



Cómo abrir el envase

Para abrir, enrosque la tapa en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga. La punta dentro de la tapa perforará el sello.

*también para le

PROGENT

1 VEZ
POR SEMANA

Limpieza semanal para lentes rígidos permeables al gas*, para garantizar una calidad única en la superficie.



Indicaciones

- Desproteinización
- Limpieza Intensiva
- Desinfección: Actividad desinfectante en solo 5 minutos sobre bacterias, hongos, virus y amebas
- Acción de eliminación de priones


Composición

- Dosis A: Solución de hipoclorito de sodio (NaClO 20,30mg - agua purificada q.s.p 5ml).
- Dosis B: Solución de Bromuro de Potasio (KBr 30,75mg - agua purificada q.s.p 5ml).



Modo de empleo PROGENT

- Coloque cada lente en el soporte correspondiente del estuche PROGENT, "R": derecho, "L": izquierdo.
- Abrir una dosis A y luego una dosis B con cuidado y sin tocar la tapa vaciarlas en el estuche PROGENT.
- Cerrar, agitar suavemente, remojar durante 30 minutos (no exceder los 30 minutos ya que existe riesgo de decolorar los lentes).
- Abra el estuche y vacíe el contenido en el fregadero.
- Enjuagar muy bien y a fondo los lentes sobre su soporte con la solución MENICARE PURE (al menos durante 15 segundos).

EVITE A TODA COSTA EL CONTACTO DE LA SOLUCIÓN PROGENT A, PROGENT B, O LA MEZCLA DE AMBAS DIRECTAMENTE CON LOS OJOS

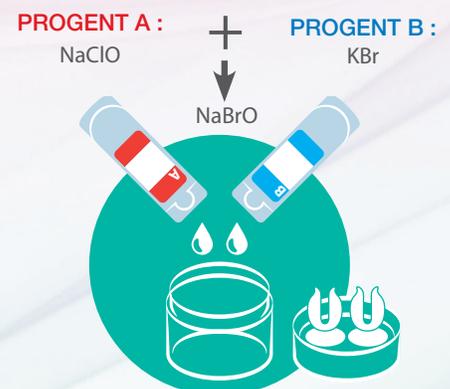

El Hipobromito generado destruye las cadenas de proteína en 30 minutos

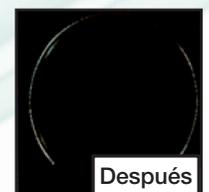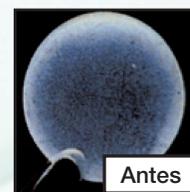

La gama MENICARE PURE & PROAGENT



Siga las recomendaciones de su especialista del cuidado de la visión.

Los productos de mantenimiento MENICARE PURE
(fabricados por Menicon Pharma)
son marcas de dispositivos médicos de clase IIb
CE0483.
Lea atentamente el manual de instrucciones.

Importado y Distribuido en México por:
Laboratorios Lumilent, SA de CV
Berlín 19 - piso 3
Col. Juárez
Ciudad de México 06600



www.menicon.com